


Technische Betriebsanleitung für den Lounge-Sessel 2025-5P0072

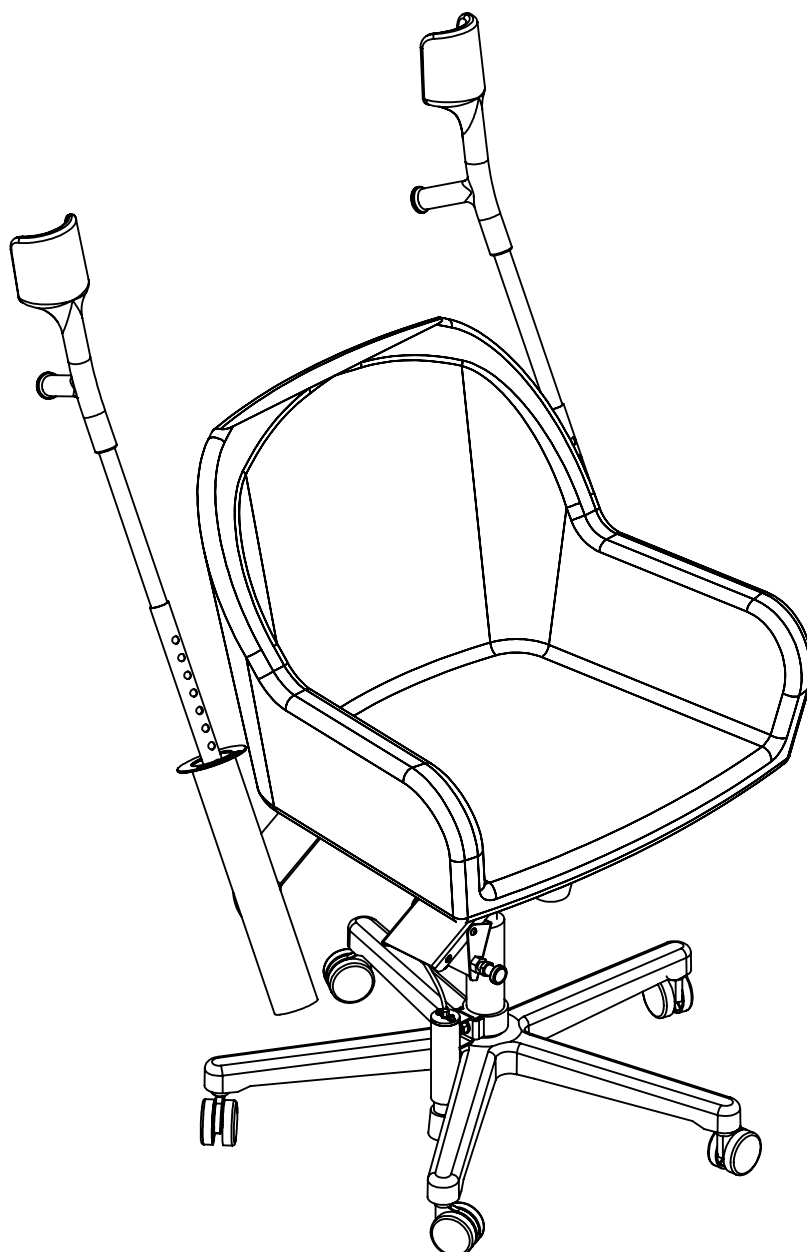

Erstellt von: Piotr Mazurczyk

Überprüft von: Barbara Grodecka

Genehmigt von: Mariusz Kania

Inhaltsverzeichnis

1.	Sicherheit	3
2.	Gesamtabmessungen	4
3.	Sitzverstellung	5-7
4.	Wartung	8
5.	Fehlerbehebung	9

1. Sicherheit

Maximale Belastbarkeit:

Der Sessel ist für Benutzer mit einem Körpergewicht von maximal 150 kg ausgelegt. Eine Überschreitung dieses Wertes kann zu Schäden an den Verstellmechanismen, der Federung oder der Tragkonstruktion führen, was eine Gefahr für den Benutzer darstellt.

Betriebsbedingungen:

Zulässiger Temperaturbereich: von -20 °C bis +50 °C. Der Stuhl ist nicht für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit (über 80 % r. F.) oder in Kontakt mit aggressiven Chemikalien geeignet.

Warnhinweise zur Nutzung

Einstellungen und Mechanismen:



Alle Einstellungen müssen gemäß der Anleitung vorgenommen werden.



Es ist verboten, bei der Betätigung von Hebeln und Drehknöpfen übermäßige Kraft anzuwenden. Bei Widerstand ist die Einstellung abbrechen und der Kundendienst zu kontaktieren.

Gefahren und Notfallmaßnahmen – Erkennung von Schäden:

Wenn der Sessel Instabilität, unkontrollierte Bewegungen oder Geräusche (Klackern, Knirschen) aufweist, muss die Nutzung sofort eingestellt werden.

Beschädigte Teile (z. B. Risse im Rahmen oder an anderen Bauteilen) müssen von einem autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden.

Die Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Stuhls hängen jedoch von der Einhaltung der oben genannten Regeln ab. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung des Herstellers:

mk-seats.com/kontakt
serwis@mk-seats.com

2. Gesamtabmessungen

Die Sitzhöhe wird entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers festgelegt.

Gewicht des Sessels:

- Standardausführung: ~21 kg

Hinweis:

- Das genaue Gewicht hängt von der Konfiguration und der Sonderausstattung ab.

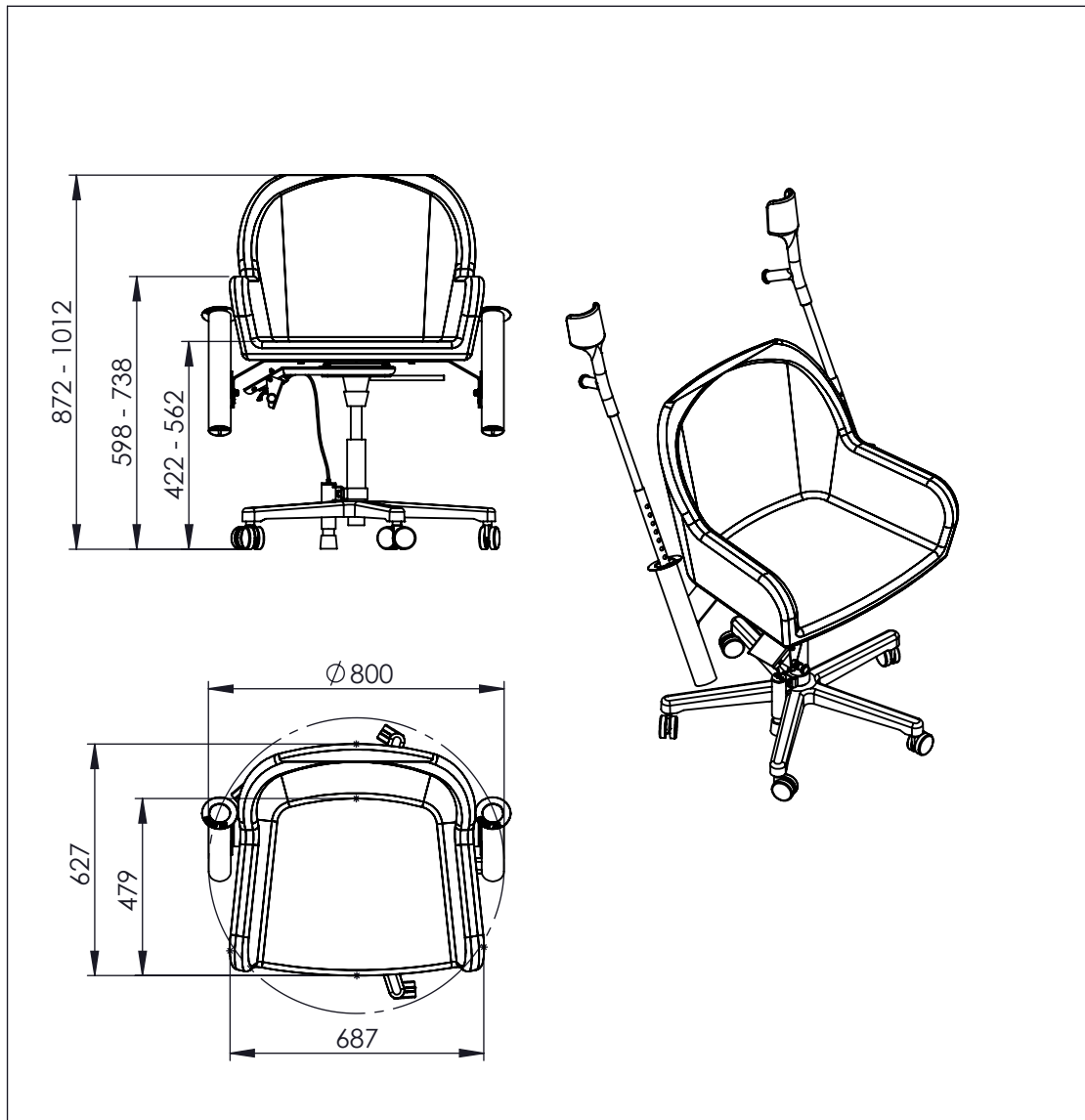


Abbildung 4.1: Gesamtabmessungen

3. Sitzverstellung

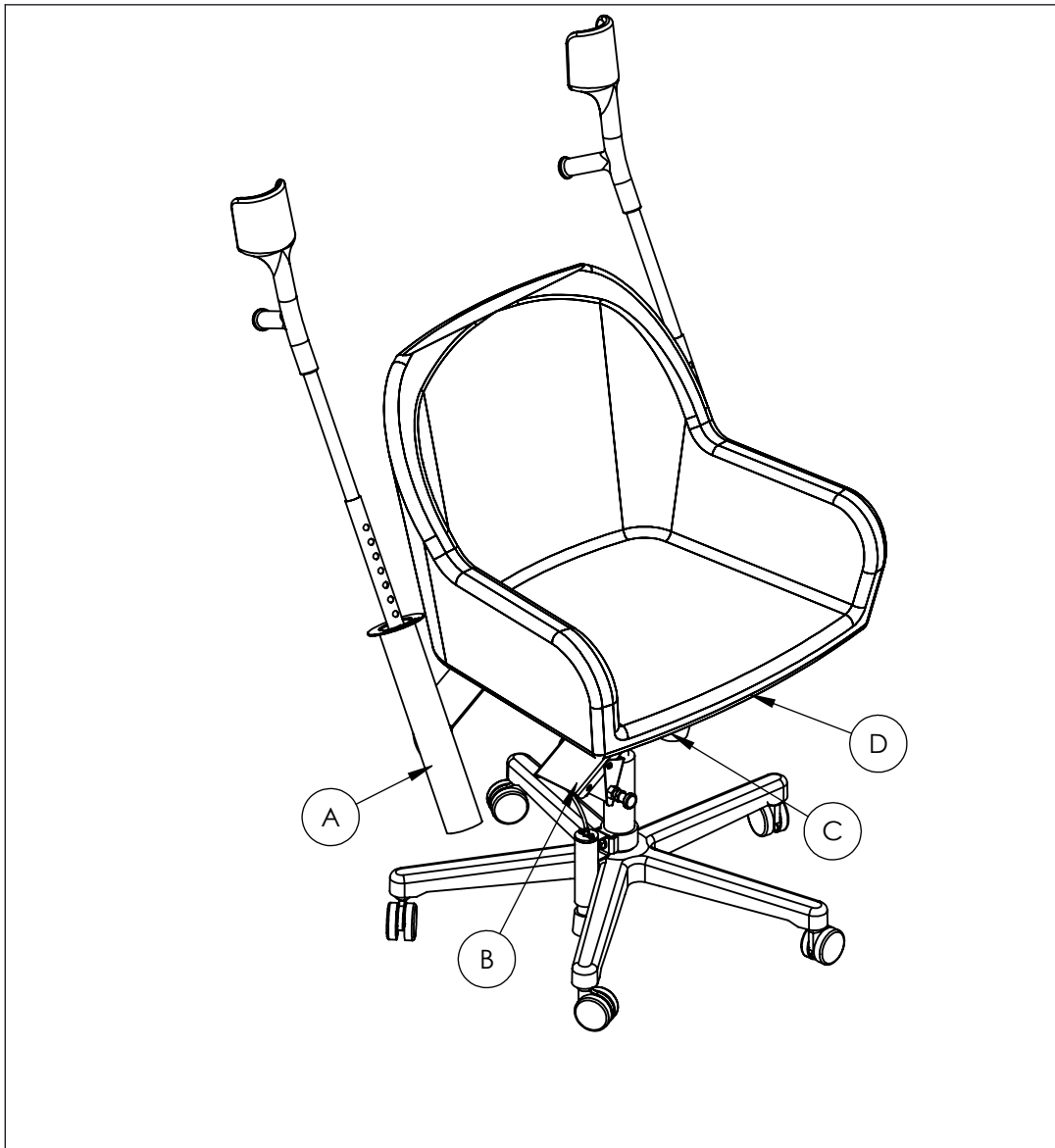


Abbildung 5.1 – Einstellung des Sitzes

A – Halterung für Krücken

B – Bremse mit Feststellvorrichtung

C – Neigungsverstellung

D – Sitzhöhenverstellung und Neigungsarretierung der „Wiege“

A – Halterung für Krücken

Ein praktischer Halter, der an der Seite des Stuhls angebracht wird und zur sicheren Aufbewahrung von orthopädischen Gehhilfen oder einem Gehstock dient. Diese Lösung wurde speziell für Personen mit eingeschränkter Mobilität entwickelt. Der Halter lässt sich nach außen schwenken, was das Entnehmen und Ablegen der Hilfsmittel erleichtert, ohne dass der Oberkörper übermäßig gedreht werden muss. Nach dem Gebrauch lässt er sich nach hinten klappen, wodurch das Risiko des Verhakens minimiert und Platz rund um das Möbelstück gespart wird.

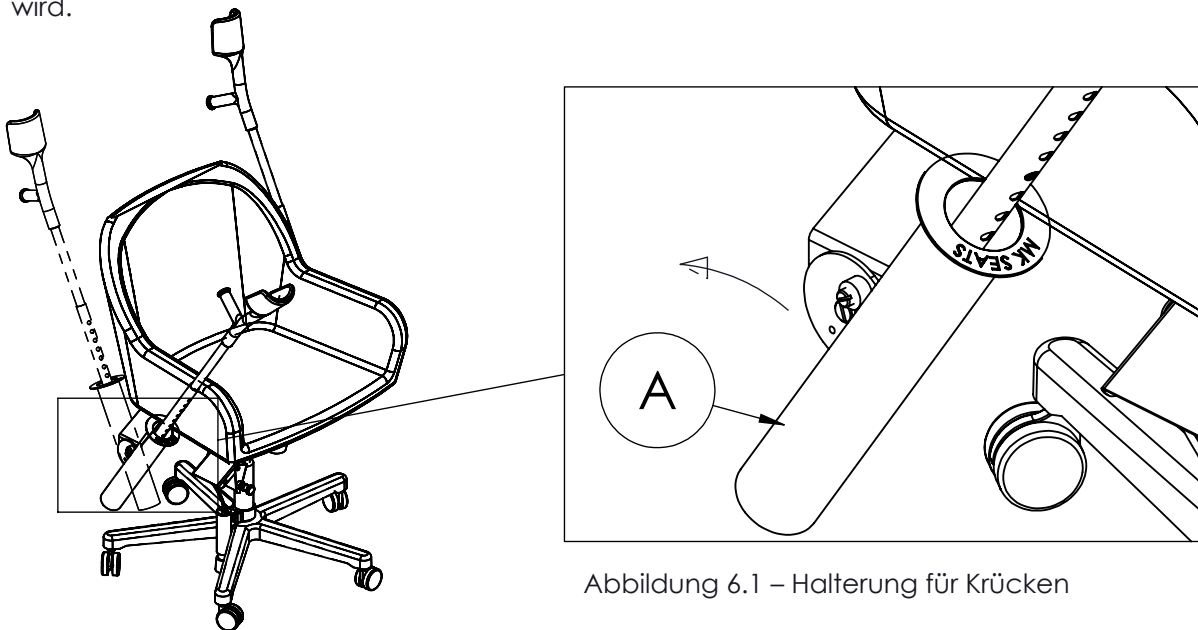


Abbildung 6.1 – Halterung für Krücken

B – Bremse

Die Bremse arretiert den Sessel dauerhaft. Um die Bremse zu lösen, genügt es, den Hebel B1 auf der rechten Seite unter dem Sitz zu betätigen – der Sessel ist dann wieder vollständig beweglich. Während der Reinigung, des Transports oder einer längeren Umstellung des Stuhls besteht die Möglichkeit, den Mechanismus dauerhaft mit einer speziellen Kappe mit Feststellstift B2 zu entriegeln, die den Hebel in der gelösten Position hält.

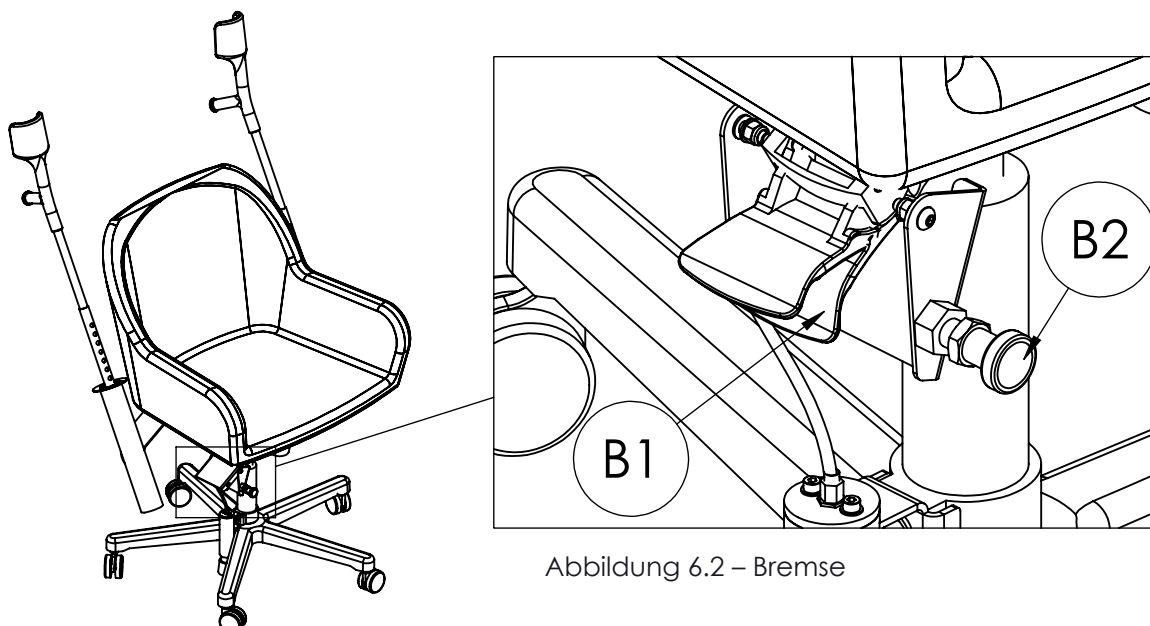
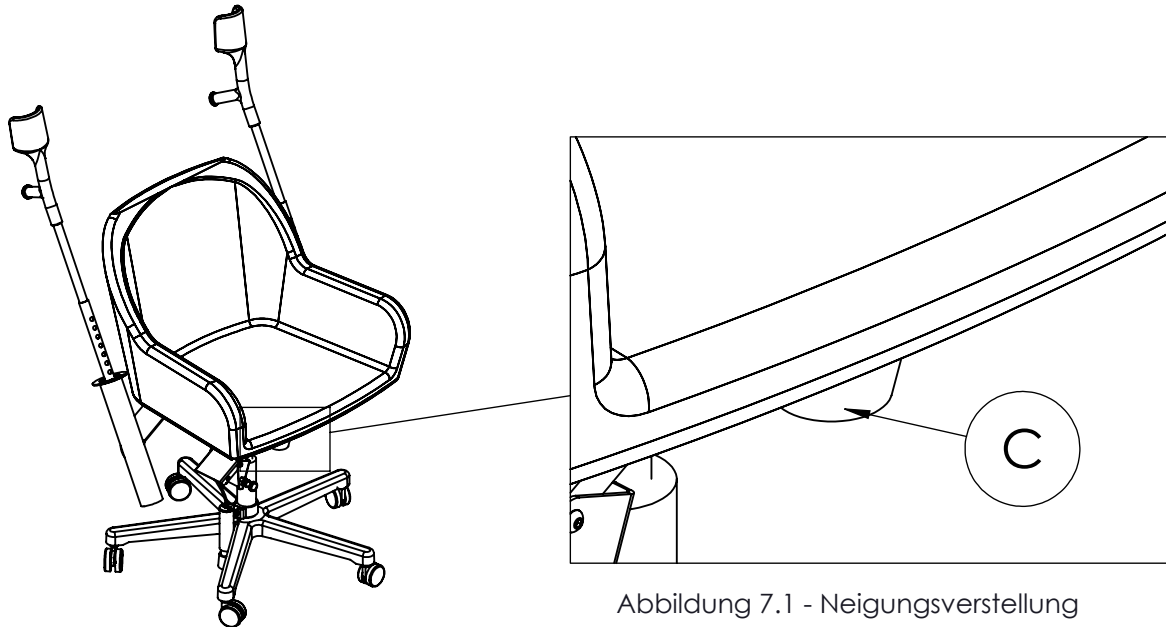



Abbildung 6.2 – Bremse

C - Neigungsverstellung des Sitzes (Schaukelmechanismus)

Ermöglicht die Anpassung des Neigungswiderstands an das Körpergewicht und die individuellen Bedürfnisse des Benutzers. Die Einstellung erfolgt über einen Drehknopf unter dem Sitz.

**D - Sitzhöhenverstellung und Neigungsarretierung der „Wiege“**

Durch Hochziehen des Hebels wird die Gasfeder entriegelt, wodurch die Sitzhöhe verstellt werden kann. Durch Herausziehen des Hebels wird der „Wiegen“-Mechanismus entriegelt, wodurch sich der Sitz frei bewegen bzw. frei neigen kann.

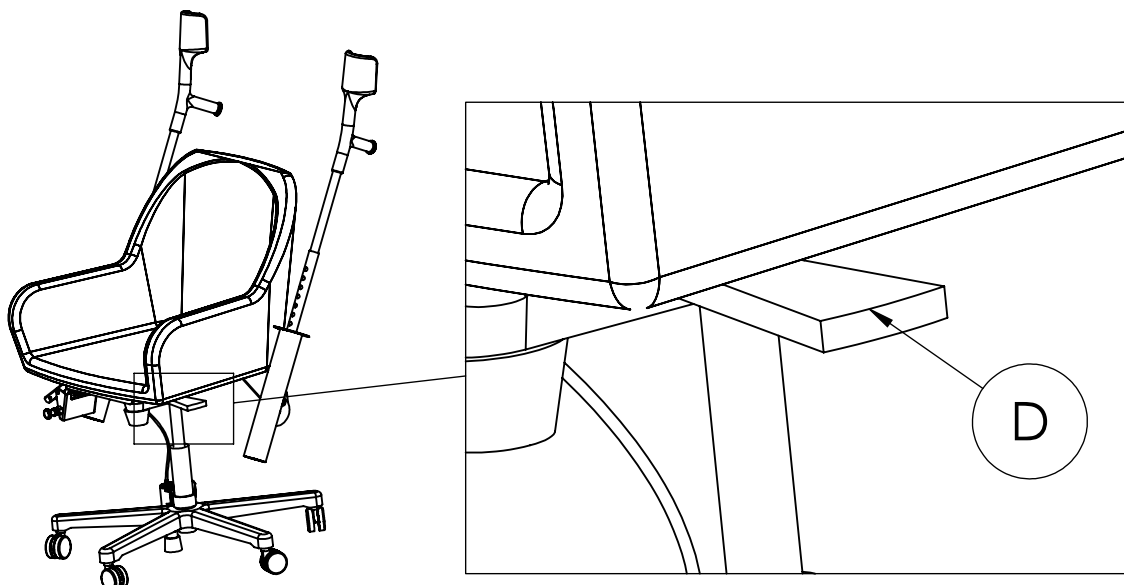

4. Wartung

Allgemeine Empfehlungen:

- Verwenden Sie Polsterreiniger in Schaumform (mit geringem Wasseranteil).
- Mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm bei einer Temperatur von 20-40 °C reinigen.
- Entfernen Sie den Schaum nach dem Auftragen umgehend, um ein Durchweichen zu vermeiden.

Beschreibung der Reinigungsmethoden:

1. Sauberes, warmes Wasser - für lösliche Verschmutzungen.
2. Kaltes Wasser - für Eiweißflecken (Blut).
3. Polsterreiniger-Lösung - Grundreinigung.
4. Reiner Alkohol - für fettige und hartnäckige Flecken.
5. Ölfreies Aceton - für Farbstoffflecken (Vorsicht bei Farben!).
6. Kaugummientferner - vor Gebrauch einfrieren.
7. Fettfleckenentferner - gegen Fett und Kosmetika.

Methoden zur Entfernung bestimmter Verschmutzungen:

- **Kaffee, Tee:** 3, 1, 4 (Verdünnung 1:5) Materialverträglichkeit prüfen.
- **Fruchtsaft, Getränke:** 3, 3 (+ ein paar Tropfen Alkohol) Wirkt schnell.
- **Schokolade:** 1, 3, 4, 7 - Rückstände vor der Reinigung mechanisch entfernen.
- **Blut:** 2, 3 - Heißes Wasser vermeiden (fixiert Flecken).
- **Urin:** 3, 4 - Zuerst trocknen, dann reinigen.
- **Erbrochenes:** 1, 3 - Vor der Reinigung Rückstände entfernen.
- **Kaugummi:** 1, 4, 6 - Vor dem Entfernen einfrieren.
- **Lippenstift:** 5, 7 - An einer kleinen Stelle testen.
- **Nagellack:** 5, 7 - Längeren Kontakt vermeiden.
- **Tinte (Kugelschreiber):** 5 oder 4 - Vorsichtig vorgehen.

Pflege der übrigen Teile (Rahmen, Metallteile, lackierte Oberflächen)

Zulässig:

- Wasser mit einem neutralen Reinigungsmittel (pH-neutral).
- Weiche Materialien (Mikrofaser, Schwamm ohne Scheuermittel).
- Lackbenzin (für Fettflecken, ohne Aromastoffe und Isopropylalkohol).

⚠ Verboten:

- Aggressive Lösungsmittel (Ester, Ketone, Alkohole, chlorierte Kohlenwasserstoffe).
- Saure, alkalische oder scheuernde Mittel.
- Längerer Kontakt mit Chemikalien (max. 1 Stunde, am besten kürzer).

Reinigungsverfahren:

- Wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und Reinigungsmittel ab.
- Keinen übermäßigen Druck ausüben - Kratzer vermeiden.
- Nach der Reinigung mit klarem Wasser abspülen.
- Mit einem weichen Tuch trocknen.

Umgebungsbedingungen:

- Temperatur: Nicht über 25 °C. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden- UV-Strahlung verstärkt die Wirkung von Chemikalien.
- Polster mit Schaum reinigen, Durchfeuchtung vermeiden.
- Metall- und lackierte Teile - nur milde Reinigungsmittel verwenden, schnell trocknen lassen. Aggressive Chemikalien vermeiden - sie können die Oberflächenbeschichtung beschädigen.

5. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Geräusche (Klopfen, Knirschen)	- Lose Befestigungsschrauben - Fehlendes Schmiermittel in den Mechanismen	1. Schrauben prüfen und festziehen. 2. Schmieren Sie die Mechanismen gemäß der Anleitung (z. B. mit Schmierfett LT-43). 3. Wenn das Geräusch weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Der Sitz ist instabil	- Lose Einstellknöpfe - Verschlissene Verriegelungsmechanismen	1. Ziehen Sie die Einstellknöpfe fest. 2. Ersetzen Sie die verschlissenen Teile.

Wann sollten Sie sich an den Kundendienst wenden?

Melden Sie das Problem einem autorisierten MK Seats-Kundendienst, wenn:

- ⚠ Der Sitz konstruktive Instabilität aufweist (z. B. Risse im Rahmen).
- ⚠ Die Verstellfunktionen nicht ordnungsgemäß funktionieren.



Kontakt:
mk-seats.com
serwis@mk-seats.com